

こつ えい ひ ほ じ ぐ  
**骨鋭匙保持具 松本氏**



**SSハンドル外筒**

(10164001)

<使用方法>

- ・使用する骨鋭匙の形状に合致するSS内筒を選択します。
- ・SS内筒と骨鋭匙の間や、内筒と外筒の間ががたつきや異常がある場合は使用しないでください。
- ・ハンドルをねじ込んで内筒が確実に固定されていることを確認して使用してください。



**SS4角穴内筒**

(10164002)

- ・持ち手部分が平型の、骨鋭匙 切替氏各種と組み合わせて使用します。




**SS8角穴内筒**

(10164003)


- ・骨鋭匙 ローゼン氏各種、鋭匙 ローゼン・愛媛大型各種と組み合わせて使用します。

●骨鋭匙の軸方向は自由に動かすことができます。

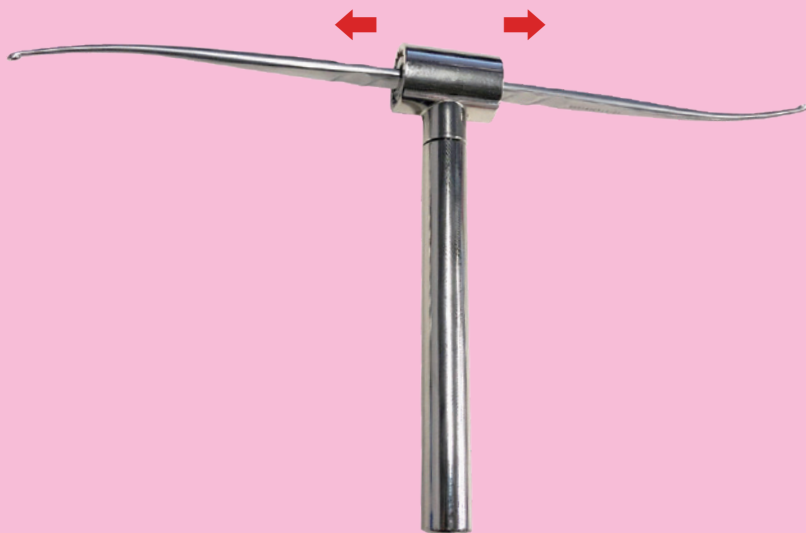


てこの原理で軽く回すことができ、骨削開が容易に行えます。

**使用例**

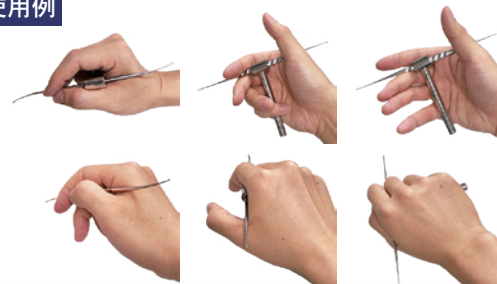

**使用例**

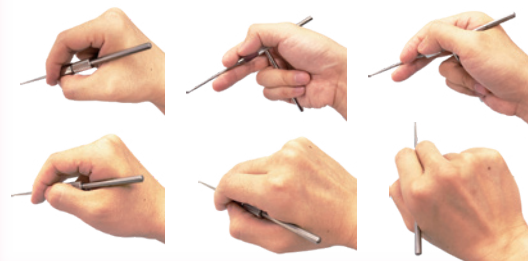

**永島医科器械株式会社**

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323  
 [東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824  
 [名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326  
 [大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



本社・第二工場・第三工場に適用

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。

2403-01-K03