

医療機関向け除菌洗淨液

セクリン

驚異的な血液分解と除菌能力

さらに低価格な高純度二酸化塩素水

特徴

頑固な血液付着を除去します。

洗剤や薬剤が進入不可能な、微細な隙間にも効果があります。

滅菌相当の強力な除菌が可能です。

塩素剤ではありません。酸素系酸化剤です。

安全性が高く、飲用水に2ppmまでの混入が認められております。

残留性がないため安全であり、下水に流しても環境汚染その他の障害が発生しません。

水溶液自体のPH値は6です。

安定化二酸化塩素ではありません。

注意事項

二酸化塩素は刺激臭のあるガス体です。原液のにおいをそのまま嗅ぐのはやめてください。

紫外線や温度によって自然劣化が早く進みますので、なるべく冷暗所保管をお願いします。

酸化力が強いいため、使い方によっては金属・プラスチック・ゴムなどに影響を与える場合があります。

成分

- セクリン原液の成分含有量
- 二酸化塩素 600ppm
- 塩化ナトリウム 600ppm

使用法

内視鏡急速洗淨器ESPALにてスコープの自動洗淨除菌に使用します。

トレーなどに水道水で20倍に希釈したセクリンを用意し、器具を2～5分浸漬した後、水ですすぎ洗います。

消臭、浴室およびトイレ内洗淨除菌、厨房洗淨除菌など目的に応じて10～60倍に希釈したセクリンを噴霧します。

価格

セクリンEL ¥11,000(10ℓ入)

セクリンES ¥8,500(5ℓ入)



医療機関向け多目的洗浄剤

SEIKEN

ハイ・クリーン

蛋白分解酵素入り洗剤以上の血液および油脂除去効果と高い除菌能力により
飛沫などによる二次感染を防ぐ医療機関向け多目的洗浄剤
内視鏡および手術器材・処置具の洗浄に最適です。

特徴

- 微細な酸素の泡が付着物を浮き上がらせます。
- オキシドール成分により強い抗菌作用があります。
- 酸素による漂白作用があります。
- 低発泡性の為すすぎ洗いの水が節約できます。
- 高い血液除去効果があります。
- 温度に関係なく同じ洗浄能力を維持します。
- 低コストです。

成分

- ・非イオン界面活性剤（ヤシ脂肪酸）
 - ・過炭酸塩
 - ・炭酸塩
- ※希釈液は弱アルカリ性

使用法

水又はぬるま湯 1ℓに対し付属スプーン 1 杯（5g）の
ハイ・クリーンを溶かします。

- ①希釈液をスプレー噴霧して3分ほど経過すると汚れが浮き
上がり流れ落ち始めますので、水またはぬるま湯ですすぎ
洗いしてください。
- ②トレイなどに用意した希釈液に5分ほど浸漬した後、水ま
たはぬるま湯ですすぎ洗いしてください。頑固な汚れに適
しています。
- ③希釈液をたっぷり含ませたガーゼなどでゆっくりしごき洗
いします。内視鏡の洗浄に適しています。

価格

ハイ・クリーン 1000 ￥9,000（濃縮粉末1Kg、5g計量スプーン入り）
ハイ・クリーン 350 ￥3,800（濃縮粉末350g）



株式会社
精研

名古屋市昭和区川名町2-30-5
TEL 052-762-0808 FAX 052-761-9186
東京サービスセンター TEL 03-3777-3467 工場 TEL 03-3777-3356